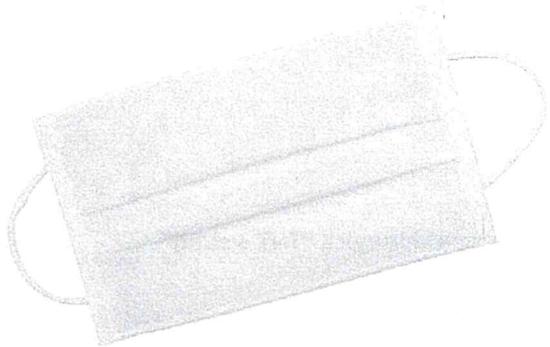
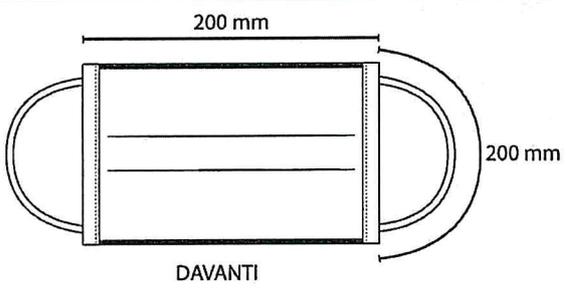
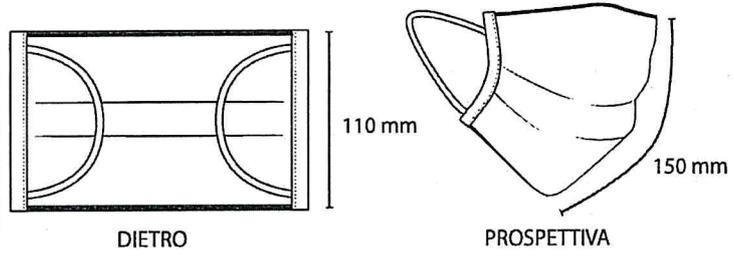


INFORMAZIONE GENERALE		
CODICE ART. ITMASK		
NOME Mascherina Facciale		
DESCRIZIONE <ul style="list-style-type: none"> • Tre strati di materiale TNT • Due pieghe • Elastico morbido per orecchie 		
MATERIALE PRIMARIO TNT 30 gr.		
MATERIALE SECONDARIO <ul style="list-style-type: none"> • Elastico 4mm 100% poliestere 		
INFORMAZIONE TECNICA		
 <p>200 mm</p> <p>200 mm</p> <p>DAVANTI</p>	<p>MISURE DEL PRODOTTO A riposo: 110 mm x 200 mm Steso: 150 mm x 200mm</p>	
 <p>110 mm</p> <p>150 mm</p> <p>DIETRO</p> <p>PROSPETTIVA</p>	<p>MISURE DEL ELASTICO 200 mm</p>	
INFORMAZIONE TECNICA CONFEZIONE	CONFEZIONE 100 pz.	IMBALLAGGIO Buste termosaldate

Realizzata ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N. 17 del 19 Marzo 2020 denominata mascherina 3 veli TNT Toscana 1.

Utilizzabile nel rispetto di quanto stabilito all'allegato 3
Non costituisce DPI

Mascherina chirurgica "TNT 3 strati"

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa.

Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani.

Per indossarle correttamente:

- ✓ Lavarsi le mani;
- ✓ Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;
- ✓ Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso;
- ✓ Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far aderire bene la mascherina al viso;
- ✓ Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.

Per toglierle:

- ✓ Lavarsi le mani
 - ✓ Sciogliere i lacci inferiori;
 - ✓ Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada;
 - ✓ Portare lentamente in avanti le mani;
 - ✓ Gettare la mascherina all'interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all'interno;
 - ✓ Lavarsi le mani
2. QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da altre persone.
 3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce con il respiro come da indicazioni dell'OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro.